

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
タスカルカバーは、腕や足に治療中の傷やギブスあるいは点滴の留置き針など
があっても、患部を濡らさずにシャワーや洗髪ができる
『シャワー専用の防水カバー』です。
ご使用の前に、取扱説明書を読んで、快適にご利用ください。

◆ご利用上の注意

- ① 装着して浴槽やプールに入らないでください。
- ② 決して足に装着したまま浴槽等に入らないでください。
 - カバーは、優しく取り扱ってください。
 - シールベルトは、優しく取り扱ってください。

◆装着の方法

- ① セロテープを 6cm ほど切り出し、一端を 1cm ほど折り返しておきます。
 - ② 希望の位置にカバーを仮装着します。
 - ③ カバーの内側にアジャスタ小を貼り付けます。
 - ④ カバーを掴まみ上げ、たるみを取りながら、腕の下側に密着させます。
 - ⑤ たるみの根元部分にアジャスタを貼り付けます。
 - ⑥ たるみの先端に固定用のセロテープを貼り付けます。
 - ⑦ カバーのたるみ部分を腕に巻付けます。
 - ⑧ カバーが緩まないよう、セロテープで固定します。
 - ⑨ カバーにシールベルトを貼り付けます。
 - ⑩ シールベルトを巻付け、ベルクロで固定します。
 - ⑪ ②項で、カバーのたるみが大き過ぎる場合、アジャスタで調節します。
- Tタイプでは、手首側のシールも同様に行います。
- Mタイプを足につける時は、カバーの上から靴下を履きます。

※ 詳細は、商品同梱の取扱説明書をご参照ください。

通販ショップ タスカル

<https://www.tascal.co.jp/>